



STARSOFT Definitive 74 UV

Vår SiliconHydrogel lins som kan tillverkas i alla önskvärda parametrar och färgas.

Starsoft Definitive 74 UV

Har ett högvätskehaltigt material som behåller fukten konsekvent under hela dagen, endast 0,7 % går förlorat, och förser bäraren med följande fördelar:

- Ger en utmärkt synskärpa och en enastående komfort.
- Vattenbindande kombinerat med utmärkt stabilitet
- Har samma stadga som konventionella mellanvätskehaltiga material, vilket många andra silikonmaterial har problem med, men ändå mjuk och hal som gör den behaglig på ögat.
- Inneboende vätkbar yta som inte kräver ytbehandling.
- Ett utmärkt material som passar de som har problem med torra ögon eller beläggningar.
- Fungerar utmärkt som klacklins eller bandagelins.

Material	Filcon V3, icke-joniskt	UV-block	Ja
Vätskehalt	74 %	Färger	Hanteringsfärgad ljusblå, kan färgas i alla våra färger, dock ej occlusion (tät)
DK	60	Användningstid	3-6 månader
DK/T	Multi-asfärisk lins med Wavefront™Teknologi		

Uttagningstips

Då Starsoft Definitive 74 UV är ett glatt/halkigt material kan patienten uppleva svårighet att ta ur linsen innan han/hon vant sig. Prova då den vanliga "pinch off" metoden eller gärna samma metod som för att ta ut en RGP-lins dvs. påtryckningar på övre och undre ögonlocken. Ökad komfort för bäraren genom unik linsdesign

Rekommenderade vätskor

SoloCare Aqua (Focus Aqua), OptiFree Express, OptiFree RepleniSH, ReNu Multipurpose, Complete Multipurpose, Synergi, Menicare Soft.

Rekommenderade enzymlösningar

Enzyme (Avizor), Amclair (Abatron).

Andra tips

Peroxid lösningar bör helst undvikas och alkoholbaserade lösningar får ej användas. Autoklavering är att föredra vid sterilisering, dock med så kort upphettning som möjligt, max 121grader i 30 minuter.

